

Attention : ce préservatif est fabriqué en latex de caoutchouc naturel qui peut provoquer des réactions allergiques. L'utilisation d'un préservatif ne peut garantir une protection à 100 % contre la grossesse ou les infections sexuellement transmissibles.  
Numéro de lot et DLC sur l'emballage du préservatif

**PHICOGIS EUROPE S.A.R.L.**  
14, rue de l'Industrie  
67114 ESCHAU - FRANCE



largeur  
53  
mm



VIH • SIDA • HÉPATITES

Un doute ?  
Faites-vous dépister.



+ d'infos auprès de l'Unité Sanitaire

**CORE**  
**VIH**  
GRAND  
EST

# 1 préservatif fin JACKET® Anatomique + 1 Gel



Préservatif JACKET®  
conforme à la norme  
NF EN ISO 4074



Gel intime JACKET® à base d'eau  
conforme à la norme  
NF S97-034

Importateur et distributeur  
PHICOGIS EUROPE - 14 rue de l'Industrie - 67114 ESCHAU - FRANCE

## Conseils d'utilisation

Le préservatif doit être placé sur le pénis en érection avant tout contact entre le pénis et le corps du partenaire afin de permettre la prévention d'infections sexuellement transmissibles et de la grossesse. Afin de réduire les risques de rupture du préservatif, l'utilisation d'un gel est recommandé : lorsqu'un lubrifiant supplémentaire est utilisé, il est nécessaire d'utiliser le type de lubrifiant approprié recommandé avec les préservatifs et d'éviter l'utilisation de lubrifiants à base d'huile, tels que la vaseline, l'huile pour bébé, les crèmes pour le corps, les huiles de massage, le beurre, la margarine, etc., car ceux-ci sont nuisibles à l'intégrité du préservatif. N'utiliser que des gels à base d'eau. Consulter un médecin ou un pharmacien concernant la compatibilité des médicaments topiques pouvant venir en contact avec le préservatif.



1. Pousser le préservatif à une extrémité de l'enveloppe. Ouvrir délicatement l'emballage prédecoupé à la main, ne pas utiliser d'objets tranchants ou pointus (couteau, ciseaux, etc.). Prendre garde de ne pas abîmer le préservatif avec les ongles, les bijoux, etc. Si l'emballage individuel est manifestement endommagé, jeter ce préservatif et en utiliser un nouveau provenant d'un emballage non endommagé.



2. Appliquer le préservatif sur le gland découvert en pinçant le réservoir au bout du préservatif pour en chasser l'air.



3. Dérouler le préservatif jusqu'à la base du sexe en érection en maintenant le réservoir. Le déroulement doit être facile, sinon il est dans le mauvais sens. En cas de sensation de glissement du préservatif ou de serrage excessif sur le pénis, il est nécessaire d'interrompre le rapport pour procéder à une vérification car ceci peut conduire à une rupture.



4. Dès la fin du rapport (éjaculation) et avant la fin de l'érection, se retirer en maintenant le préservatif à sa base.



5. Jeter le préservatif usagé à la poubelle après l'avoir noué. Ne jamais réutiliser le préservatif. Réutiliser un préservatif augmente considérablement leur risque de ruptures et celui de la transmission.

- En cas de fuite ou de rupture du préservatif pendant l'utilisation, rechercher une assistance médicale aussi rapidement que possible, au moins dans les 48 heures.
- Le préservatif est à usage unique : utilisez un nouveau préservatif lors de chaque rapport sexuel ou chaque changement de partenaire. Sa réutilisation augmente considérablement le risque de défaillance ou d'infection.
- Ce préservatif est en latex de caoutchouc naturel, ce qui peut provoquer des réactions allergiques, incluant un choc anaphylactique.
- La dosette de gel est à usage unique.
- Notice révisée : 05/2019
- Lire attentivement la notice.
- **Conserver les préservatifs dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil, de la chaleur et de l'ozone.**

Préservatif masculin lubrifié à usage unique  
conforme à la norme (NF EN ISO 4074)  
latex de caoutchouc naturel - couleur naturelle  
surface lisse - avec réservoir  
Largeur nominale : 53 mm +/-2mm

EC REP

Advena Limited,  
Shanghai International  
Holding Corp. GmbH  
(Europe),  
Eiffestr. 80,  
D-20537 Hamburg,  
Germany,  
Tel / Fac.  
+0049-40-2513175  
+0049-40-255726



Préservatif JACKET®  
Shanghai HBM Healthcare, Inc.  
902-904, No. 255 New Golden Bridge,  
Pudong, Shanghai, 202216 China



Gel intime JACKET®  
Cosminter Laboratoire Polymerdyll®  
21350 Vitteaux - France